

BR16

## Kerenna WhitenMAX BR16

The Easy-Comfortable Teeth Whitening unit

美白只要一鍵搞定

- 操作簡單，一鍵搞定！
- 造型輕巧，容易收藏！
- 方便愛美的你隨時使用！
- 搭配凱倫娜牙齒美白組系列，效果更加明顯！

[www.kerenna.com.tw](http://www.kerenna.com.tw)



Ⓚ 機器配件含充電器  
及使用操作說明書

DIY  
To Go:  
**16**  
percent

## 凱倫娜牙齒美白筆組-個人套組



Professional tooth whitening Gel

Carbamide peroxide **16%**

Impressive your smile impressive your white

凱倫娜美白筆是提供你便利的牙齒美白方法，無論在任何地點或任何時間都可以方便使用。凱倫娜美白筆的毛尖刷頭能深入牙齒的表面，讓你無論想要維持牙齒潔白還是改善牙齒美白問題，都能達到最佳的效果。使用起來快速簡單又實用，讓你擁有明亮又潔白的笑容。



### 操作步驟：

1. 使用前保持牙齒表面乾燥。
2. 取下美白筆蓋。
3. 扭轉美白筆底部，直至筆端出現美白凝膠(第一次使用需旋轉20-30次左右)。
4. 請直接塗抹在牙齒上，塗抹後請停留15-20分鐘；或是使用美白燈光照3分鐘。
5. 完成美白後，請以清水漱口將牙齒表面凝膠清洗乾淨。



## 護敏凝霜



凱倫娜護敏凝霜含有中性鈉及氟化物成份，能填補牙本質小管表層的缺口，及減緩因美白過程中所造成的牙齒敏感；清涼的薄荷味，可以讓你保持口氣清新，內含的氟化物也能達到口腔保健的效果。無論是在專業牙科診間、SPA美容中心或是在家裡都能方便使用，提供給您預防及保養的多重功效。



### 操作步驟：

1. 美白後取適量凝霜直接塗抹在牙齒上。
2. 塗抹後請停留幾分鐘，以達到最好的效果。
3. 使用後，以清水將牙齒表面殘餘的產品清洗乾淨。



茂傑生技股份有限公司  
MONITEX Industrial CO., LTD


6F., No.70, Sec. 1, Guangfu Rd., Sanchong Dist.,  
New Taipei City 241, Taiwan

[www.kerenna.com.tw](http://www.kerenna.com.tw)



美白後


美白前

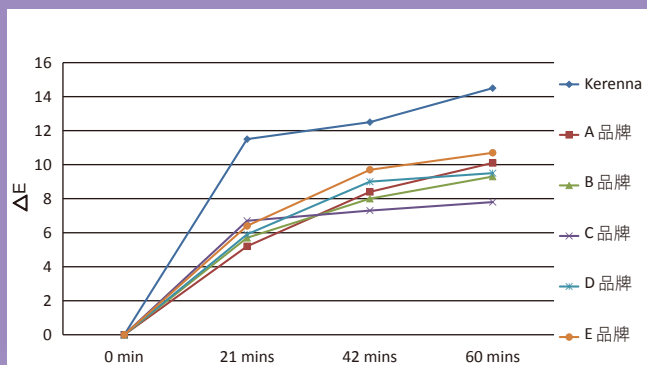

- 測試條件：使用BR16美白燈照射1小時。
- $\Delta E$  越大代表美白效果越好，使用Kerenna後的美白效果遠較其它競品優異。
- Kerenna美白凝膠組內含特殊感光因子，需搭配專屬美白燈，效果更加倍！
- 凝膠冷藏保存，更能維持美白效果！

### 實驗效果：

- ✓ 產品經細胞毒性評估，証實無細胞毒性。
- ✓ 經測試評估，可有效減緩牙齒敏感現象。

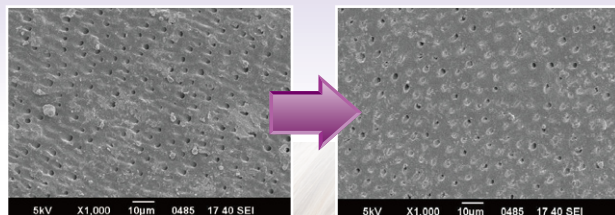

使用前

使用後

